



# CIDEZYME™

ENZYMATISCHE  
REINIGUNGSLÖSUNG

## MANUELLE REINIGUNG

Der Enzymreiniger

**CIDEZYME™** ist eine milde Lösung zum Einweichen und Reinigen vor der Desinfektion. Er löst organische Verschmutzungen wirkungsvoll von kontaminierten Endoskopieinstrumenten und anderen Medizinprodukten.



## PRAKTISCHE VORTEILE FÜR SIE

Der Enzymreiniger **CIDEZYME™** wird empfohlen für die Reinigung von Medizinprodukten vor Anwendung der ASP-Lösungen zur High-Level-Desinfektion.

- WIRKSAM UND GRÜNDLICH DURCH PROTEASE UND TENSIDE
- SCHNELLE WIRKUNG
- EINFACHE ANWENDUNG
- AUSGEZEICHNETE MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

**ASP**

# CIDEZYME™

## ENZYMREINIGER-LÖSUNG



### → MERKMALE UND VORTEILE

<b>WIRKSAM DURCH PROTEASE</b>	Bricht proteinhaltige Verschmutzungen im Biofilm – Blut, Schleim oder Fäkalien – bei geringerer mechanischer Einwirkung auf.
<b>EFFEKTIV DURCH TENSIDE</b>	Zur verbesserten Benetzung schwer zugänglicher Bereiche wie Endoskopkanäle sowie zur wirksamen Entfernung von Fetten.
<b>SCHNELLE WIRKUNG</b>	Die Wirkung setzt innerhalb einer Minute ein, das verkürzt die Aufbereitungsdauer.
<b>GUT ABSPÜLBAR</b>	Die geringe Schaumentwicklung und der neutrale pH-Wert verhindern Rückstände, so dass die Instrumente wirkungsvoll desinfiziert werden können.
<b>ANGENEHME ANWENDUNG</b>	Mit frischem Spearmint-Duft, der den Geruch schmutziger Instrumente überdeckt.
<b>EINFACHE DOSIERUNG</b>	Durch die separat erhältlichen Dosierpumpen.



### MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

Die Enzymreiniger-Lösung **CIDEZYME™** eignet sich zur Reinigung zahlreicher Instrumente aus Metall, Kunststoff oder Elastomer und ist damit ein vielseitiger Reiniger zur gründlichen Reinigung von Medizinprodukten.

### TECHNISCHE DATEN

<b>MEDIZINPRODUKTE-KLASSE</b>   Klasse 1 gemäß MDR (EU) 2017/745
<b>ANWENDUNGSKONZENTRATION</b>   8 ml (0,8 %) oder 16 ml (1,6 %) pro Liter Wasser
<b>EINWIRKDAUER</b>   1 bis 3 Minuten
<b>STANDZEIT</b>   Bei Bedarf frisch ansetzen
<b>LAGERFÄHIGKEIT</b>   2 Jahre
<b>LAGERUNG</b>   15–30 °C
<b>ENTSORGUNG</b>   Ausguss oder gemäß den in der Einrichtung geltenden Vorschriften

### BESTELLINFORMATIONEN

BESTELNR.	BESCHREIBUNG	PACKUNGSMENGE
2258	CIDEZYME™ Enzymreiniger-Lösung	12 × 1 Liter
2260	CIDEZYME™ Enzymreiniger-Lösung	4 × 5 Liter

Die Enzymreiniger-Lösung **CIDEZYME™** kann auch zur Instrumentenreinigung in Reinigungsautomaten verwendet werden, wenn die Herstelleranweisungen beachtet werden.

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE VON IHREM ANSPRECHPARTNER BEI ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS.

[asp.com](http://asp.com)

**ASP** Advanced Sterilization Products

ASP Deutschland GmbH  
Uhlandstraße 49, 78554 Aldingen  
©ASP 2021. Alle Rechte vorbehalten.



ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS, INC.  
33 Technology Drive, Irvine CA 92618, USA



ASP, The Netherlands BV  
BIC 1, 5657 BX Eindhoven, The Netherlands

